



ANIOSEPT ACTIV

PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACI INSTRUMENTARIA / VYŠŠÍMU STUPNI DEZINFEKCE

- Prášková formulace
- Čištění a dezinfekce + vyšší stupeň dezinfekce
- Široké antimikrobiální spektrum: v 15 min (sporicidní účinek při 2%)
- Neobsahuje perborát
- Kontrola roztoku testovacími proužky

INDIKACE

Čištění a dekontaminace / vyšší stupeň dezinfekce chirurgických nástrojů, zdravotnických pomůcek, endoskopů a termolabilního instrumentaria.

CHARAKTERISTIKA

- Prášek uvolňující peroctovou kyselinu
- Bílý prášek s nízkou granulometrií
- Hydroskopický prášek (udržujte v suchu)
- Mírná parfémace
- pH 1% roztoku: cca 8,5

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní


SLOŽENÍ

Sodium percarbonate, tetraacetyl-ethylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
Při rozpouštění přípravku ve vodě se tvoří peroctová kyselina.

NÁVOD K POUŽITÍ

ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE


1. Rozpusťte 25, 50 nebo 100g v 5 l vody dle požadované koncentrace.*
2. Nástroje a pomůcky zcela ponořte do roztoku. Namáchejte je po dobu dle požadavku na mikrobiální účinnost. Mechanicky očistěte, pokud je potřeba. Vyčistěte kanálky.
3. Důkladně opláchněte vodou z kohoutku (mikrobiologicky nezávadnou). U endoskopického vybavení vnější i vnitřní části.
4. Osušte čistou utěrkou.
5. Připravte nástroje a pomůcky pro autokláv. U termolabilního instrumentaria pokračujte vyšším stupněm dezinfekce.

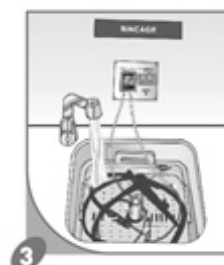

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE

1. Rozpusťte 25, 50 nebo 100g v 5 l vody dle požadované koncentrace.*
2. Zcela ponořte předem vyčištěné zdravotnické pomůcky. Naplňte roztokem také kanálky.
3. Po uplynutí předepsané doby důkladně opláchněte pomůcky sterilní nebo filtrovanou vodou.
4. Osušte pomůcky sterilní utěrkou. Skladujte sterilně.

* Kontrolujte koncentraci roztoku testovacími proužky. Roztok je stabilní 24 h.

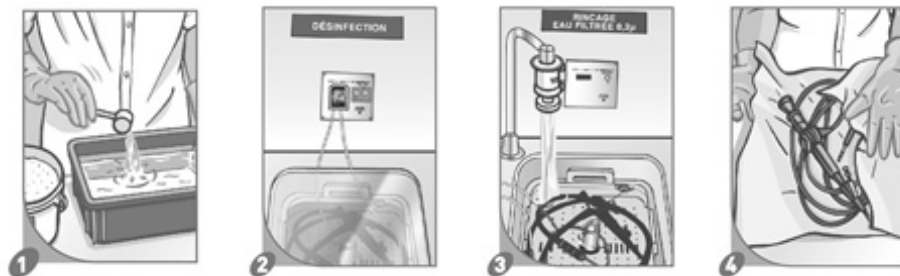

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST

ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE

Výsledek uvedený níže v tabulce odpovídá testování v znečištěných podmínkách:

Úroveň dezinfekce	Expozice		
	0,5%	1%	2%
Nízká: baktericidní, fungicidní (kvasinky)	5 min	5 min	-
Střední: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní	60 min	30 min	15 min

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE

Výsledek uvedený níže v tabulce odpovídá testování v čistých podmínkách:

Úroveň dezinfekce	Expozice		
	0,5%	1%	2%
Vysoká: baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporocidní	90 min	60 min	15 min

TYP PŘÍPRAVKU

Zdravotnický prostředek tř. IIb

BALENÍ

Aniosept Activ 1kg	4 ks/karton
Aniosept Activ 5kg	2 ks/karton

SKLADOVÁNÍ

+5°C až +30°C